

鼻洗浄器

INC-7001


家庭用

乾電池式
「乾電池別売」

◆ご使用前に必ず最後までお読みください。

も く じ

安全上必ず守ってください…	1～3
各部のなまえ ……………	4
使いかた……………	5～7
使い終わったら ……………	8
お手入れのしかた……………	8～9
故障かな？と思ったら ……………	9
定格・仕様……………	10
別売品……………	10
アフターサービスについて…………	11
保証書、無料修理規定 ……………	巻末

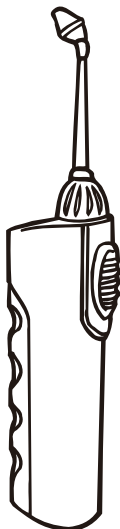

- ◆このたびは、鼻洗浄器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ◆本品の機能を十分に発揮させて正しくご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。また機器に異常がないか確認してからご使用ください。
- ◆お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



- 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
・火災・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

注意



- 鼻の洗浄以外の目的に使用しない。
・目や耳などに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。



- 耳鼻科及び眼科の疾患がある方や過去にあった方は、専門の医師に相談の上使用する。
・健康を害する原因になります。



- ご使用中に万一お体（耳・鼻・目など）に何らかの異常や不調が生じたり感じられたときは、直ちにご使用を止めて医師に相談する。



- 高齢者・小児・乳幼児や自分で操作ができない方、鼻の粘膜が弱い方などは使用しない。
・けがの原因になります。



- 機器を常に清潔にし、鼻の洗浄をするときは、新しい温水を使用する。
・不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。



- 使用後は必ず水容器内の塩水を捨て、水容器に新しい水を入れ運転し、ノズル、ポンプ内などの塩分をきれいに洗い流す。
・塩分をきれいに洗い流さないと、塩カスがつまり、噴射しくなります。不潔な状態で使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。また悪臭や故障の原因にもなります。

⚠ 注意

	●落としたり、ぶつけたりするなど強い衝撃をあてないでください。 ・故障の原因になります。
	●乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。 ・やけどやけがの原因になります。
	●新しい乾電池と古い乾電池または種類の違う乾電池を混ぜて使わない。 ・故障の原因になります。
	●長い間使用しない場合や、乾電池が消耗して使えなくなった場合は、乾電池を本体より取りはずしてください。 ・乾電池の液もれによる故障の原因になります。


使用上のご注意

- 直射日光の当たる所、湿気の多い所、水のかかる所、高温の所での保管はしないでください。
- 本体の汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふきとり、シンナーやベンジン等の使用はプラスチック部分を傷めますので、絶対に避けてください。
- 周囲温度が0℃以下または40℃以上の時は使用しないでください。
- 機器を爆発物、可燃液やガスの近くで使用しないでください。
- お子さまの手の届かない所に保管してください。

お知らせ

- 本体内部(水容器、吸入チューブ等)に水滴が付着していることがありますが、これは性能(水流)テストを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。

各部のなまえ

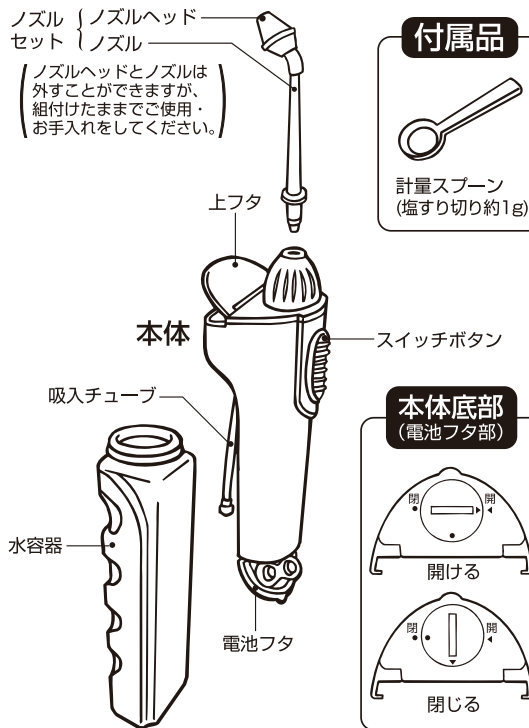

使用目的、効能又は効果


洗浄器として、鼻腔内及び鼻の奥の洗浄を行い、鼻の動きを良くする。花粉症の緩和・アレルギー性鼻炎の緩和・風邪の予防と緩和。一般家庭で使用する。こと。

使 い か た

■初めてご使用になるとき、あるいは長期間使わないで保管されたときは、一度水を通してからご使用ください。


準 備

1. 本体底部の電池フタの凹溝にコインを差し込み、回して「開」位置に▲印を合わせ、電池フタを開けます。

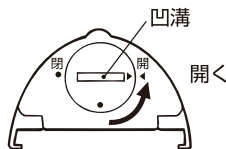


2. 単3アルカリ乾電池2本をセットし、電池フタを閉め、電池フタの凹溝にコインを差し込み、「閉」の位置に●印を合わせます。

●電池フタのプラス(+)、マイナス(-)の表示に乾電池のプラス(+)、マイナス(-)が合うようセットしてください。

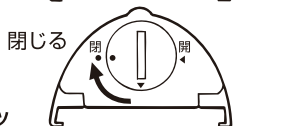

3. ノズルセット（ノズル・ノズルヘッド）を本体上部に差し込んでセットします。

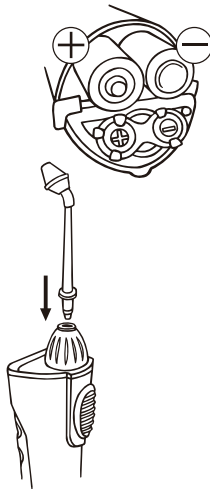

使 い か た つづき

使いかた

1. 水容器を本体から引き抜きます。

2. 水容器に温水を入れます。


- 温水は体温くらいのぬるま湯が適温です。
- 温水は水容器の肩のところまで入れてください。
- 温水温度には充分注意して、熱湯は絶対に使わないでください。

3. 計量スプーンで塩を1さじ半(すり切り約1gと半分約0.5g)を水容器に入れ食塩温水をつくります。

- 塩濃度を体液に近い浸透圧濃度にします。
- 塩は食塩または食卓塩をご使用ください。調味料が添加されたものや、岩塩などは使用しないでください。

4. 水容器を本体にセットします。

- 本体のレール部に水容器のレール部を沿わせながら差し込みます。
- 吸入チューブを水容器に入れながらセットしてください。
- 食塩温水をこぼさないよう注意してください。
- 本体にセットした後、軽く本体を振って塩と温水をよく混ぜ合わせてください。

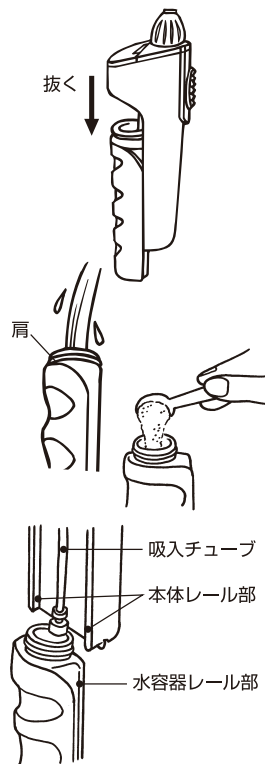

使 い か た つづき

5. 食塩温水の噴射強さを選びます。ノズルヘッドを洗面台に向け、スイッチボタンを「弱」か「強」に入れ、食塩温水の噴射の強さを確認し「切」にします。

●最初にお使いのときは「弱」でお試しください。



6. 洗面台の上に顔を出し、ノズルヘッドを鼻孔に入れ、スイッチボタンを好みの強さ（「弱」か「強」）に入れ、洗浄してください。

●洗浄中は口を開け「エー」と発声しながら洗浄してください。食塩温水が気管に入ってしまうのを防ぎます。
●耳に圧力がかかり過ぎることを防ぐため、ノズルヘッドと鼻孔は密閉せず少しすき間を開けてご使用ください。



7. 右と左の鼻腔を交互に少しずつ洗浄してください。
8. 使い終わったらスイッチボタンを「切」にします。

使い終わったら

塩水の水分が気化したとき塩の結晶が目詰まりして噴射でなくなることを防ぐため、ご使用後は必ずつぎの要領で機器内部の通水経路を洗ってください。

1. 水容器を取りはずして、水洗いします。
2. 水容器に新しい水を半分ほど入れます。
3. 水容器を本体に取りつけます。
4. ノズルヘッドを洗面台に向け、スイッチボタンを「強」に入れ、水が噴射しなくなるまで噴射してください。
 - 本体ポンプ内・ノズル内の塩分を洗い流します。
 - ノズルヘッドを下に向けすぎると水が出なくなりますので注意してください。
5. 流水が出切ったらスイッチボタンを「切」にします。
6. 水分をふき取り、充分乾燥させてから保管してください。

お手入れのしかた

本 体

やわらかい布で汚れをふき取ります。

- 洗剤を使用する場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふき取ります。
- シンナーやベンジン等の使用はプラスチック部分を傷めますので絶対に避けてください。
- 本体の水洗いはしないでください。



お手入れのしかた つづき

きれいに洗った後、乾燥させて保管してください。

ノズルセット

やわらかい布で汚れをふき取ります。汚れがひどい場合は水洗いしてください。

- 水洗い後は、水分をふき取り水をよく切ってください。
- ノズルとノズルヘッドは取りはずすことができますが、組付けた状態で洗ってください。



水 容 器

やわらかい布で汚れをふき取ります。汚れがひどい場合は水洗いしてください。

- 水洗い後は、水分をよく切ってください。

注意 機器を煮沸消毒しないでください。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処 置 方 法
水の出が悪い	●ノズルやノズルヘッドの穴にゴミや塩カスがつまっていますか？	●ゴミや塩カスをようじなど細い棒を差し込んで取りのぞいてください。
作動しない	●乾電池の寿命ではありませんか？	●新しい乾電池と交換してください。
	●乾電池が正しい方向に入っていますか？	●乾電池を正しい方向に入れてください。

※処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

定 格・仕 様

品 名	鼻洗浄器
型 名	INC-7001
電 源	単3アルカリ乾電池×2本(乾電池別売) (DC 3.0V)
使 用 回 数	単3アルカリ乾電池使用で約40回(1回/1分使用)
流 量	「弱」320ml/分以下 「強」350ml/分以下
出 水 圧	「弱」0.85MPa以下 「強」1.25MPa以下
水容器容量	約160ml
外 形 寸 法 (約)	幅50mm×奥行67mm×高さ210mm (ノズル含む高さ295mm)
重 量	約200g(乾電池を除く)
医 療 機 器	製 造 販 売 元：株式会社 泉精器製作所 長野県松本市大字笹賀3039 一般医療機器：鼻用洗浄器 (4159900) 製造販売届出番号：20B2X00001000002
動 作 原 理	本製品は単3アルカリ乾電池2本を電源とし、スイッチボタンを操作することにより、水容器内の食塩温水をノズルヘッドより噴射させる。

別売品



替ノズルセット(2本入り)
品番：NC-71

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により無料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの鼻洗浄器の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

サービス窓口

ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字竹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7泉ビル
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル212号室
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字竹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛
情
点
検



長年ご使用の鼻洗浄器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため乾電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
 - 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
 - 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ、ノズルセットの汚れ、破損、紛失
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	鼻洗浄器
型名	INC-7001
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 _____ _____ お名前 _____ 様 お電話 () _____
	住所・店名 _____ 電話 () _____

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)57-1284(サービス窓口)

(0263)86-5311(部品注文窓口)